


Ficha Técnica

Mascarilla Higiénica 3 Capas

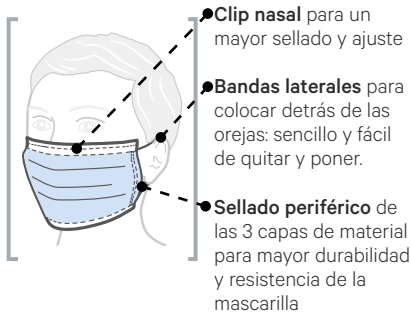

PROTECCIÓN RESPIRATORIA DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Mascarilla higiénica 3 capas (protección bacteriana) con **bandas laterales** para una sencilla colocación detrás de las orejas y para un ajuste seguro, permitiendo quitarla y ponerla con facilidad. Incorpora **adaptador nasal** para aumentar el ajuste de la mascarilla.

Está compuesta de **3 capas** de material: **las capas exteriores en polipropileno no tejido** y **una capa intermedia filtrante**.

Su **eficacia filtrante en base al Test BFE es ≥99'95%**, superando el 98% (BFE: Eficiencia de Filtración Bacteriana) que es el mínimo exigido por la norma UNE 0064-1:2020 para las mascarillas higiénicas desechables.

Ofrece una respirabilidad o permeabilidad del aire de 55 pa/cm², bajando de <60 pa/cm² que es el máximo exigido por la norma UNE 0064-1:2020 para las mascarillas higiénicas desechables.

Son **mascarilla higiénicas de un solo uso** por lo que deben ser desechadas una vez terminado su uso.


Estas mascarillas pueden **ser usadas conjuntamente con otros equipos protectores** (gafas, visores, gorros, etc...) para una protección global del usuario.


Las medidas de la mascarilla son 17,5cm x 9,5cm (±0.5cm).




Libre de Látex y Silicona

Ref.	Producto	BFE	C.Barras
AC101	Caja de 50 mascarillas higiénica	≥99'95%	8436595180032

 **No esterilizadas**



 **No reutilizar:**
Mascarilla de un solo uso

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

INFORMACIÓN MARCADOS			
Norma y Certificación	UNE 0064-1:2020 Mascarillas higiénicas no reutilizables	Eficacia Filtrante Bacteria %	Respirabilidad Presión Diferencial (Pa/cm ²)
		Resistencia a fluidos (kPa)	
		≥ 95	< 60
Certificación AENOR	 E13/000003 ALAN COSMETICS, S.L. CL JAIME I EL CONQUISTADOR, 3 BJ 30008 MURCIA (España) Mascarillas higiénicas no reutilizables ESPECIFICACION UNE 0064-1:2020		

COMPONENTES	
Capas	<ul style="list-style-type: none"> - Materia prima Primera Capa interna: Polipropileno Spunbond(PP) de 25 grs/m². con tratamiento SOFT - Materia prima Segunda Capa Filtro: Filtro Meltblown de 20 grs/m². color negro. - Materia prima Tercera Capa Externa: Polipropileno Spunbond(PP) de 30 grs/m² - Color: NEGRO - Medidas : 17,5x9,5 cm - Elástico de ajuste suaves para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos

* No contiene silicona, Latex

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Aplicaciones	Máscaras higiénicas destinadas a limitar la transmisión de agentes infecciosos y bacterianos. Mascarilla de protección para uso general, indicada especialmente para el uso en el sector Sanitario, Médico Hospitalario, Equipamiento Laboratorio, Químico, Estética, Alimentación, Limpieza, Pintura, Industria y Agricultura.
Conservación Almacenaje Caducidad	<p>Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la suciedad y el polvo.</p> <p> Mantener apartado de fuentes de calor</p> <p> Proteger de la lluvia y de la humedad</p>
Indicaciones Uso Modo empleo	<p>Este equipo ofrece una protección bacteriana muy alta, siempre que se utilice de forma correcta. Para ello deberá seguirse las siguientes indicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antes de ponerse la mascarilla, lavar las manos con desinfectantes a base de alcohol o con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos. - Cubrir la boca y nariz con la mascarilla y asegurarse de dejar el menor espacio posible entre la cara y la mascarilla. - Evitar tocar la mascarilla durante el uso - Reemplazar la mascarilla por una nueva cuando esté húmeda - Desechar la mascarilla después de su uso - Una vez finalizado el uso y tras haber desechado la mascarilla, lavar nuevamente las manos con desinfectantes a base de alcohol o con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos.
Presentación	Caja de 50 unidades. L-27cm x AL-12cm x An-10cm